

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ГЦИ СИ

Заместитель директора ВНИИОФИ

Н.П. Муравская



» 03 200 г.

<p>НАБОРЫ СТЕКЛЯННЫХ МЕР ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ НОСМОП-6-1, НОСМОП-6-2</p>	<p>Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>31552-06</u> Взамен № _____</p>
--	--

Выпускаются по техническим условиям ТУ 9443-030-11254896-2006

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор НОСМОП-6-1 (далее – набор) предназначен для поверки гемоглобинометров фотометрических портативных АГФ-03/540- «Минигем» («МиниГем 540»).

Набор НОСМОП-6-2 (далее – набор) предназначен для поверки гемоглобинометров фотометрических портативных АГФ-03/523-«Минигем» («МиниГем 523»).

Наборы используются в условиях лаборатории.

ОПИСАНИЕ

Принцип работы с набором стеклянных мер оптической плотности основан на измерении гемоглобинометром оптической плотности мер из набора и определения погрешности измерения гемоглобинометром.

Набор состоит из пяти мер (№№ 1, 2, 3, 4, 5), представляющих собой светофильтры диаметром 10 мм из оптических стекол НС8 и К8, и меры К8, представляющая собой светофильтр из оптического стекла К8. Плотность светофильтра определяется толщиной стекол НС8, а толщина стекла К8 дополняет до общей оптической толщины меры - 9 мм. Светофильтры помещены в пластмассовый корпус, имеющий форму параллелепипеда с габаритными размерами, соответствующими габаритным размерам стандартных оптических кювет с поперечным сечением 12,4x12,4 мм.

Все, входящие в набор, меры уложены в футляр.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 8.559-93 ГСОЕИ Государственная поверочная схема для средств измерений оптической плотности материалов в проходящем свете.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип наборы стеклянных мер оптической плотности НОСМОП-6-1, НОСМОП-6-2 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, и метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме ГОСТ 8.559-93.

Изготовитель: ЗАО НПП «Техномедика» 129281, г. Москва, Староватутинский проезд, дом 5, строение 3, тел. 181 45 18, факс 403 86 66.

Директор ЗАО НПП «Техномедика»



Е.Н. Ованесов